

**CUTII DE ARHIVARE DE OTEL, NECOROZIVE, STERILIZABILE | STAINLESS STEEL - BUR BLOCK, NON-CORROSIVE, STERILIZABLE**

These products are manufactured from colored anodized aluminum. When using chemical cleaning solutions, a slight discoloration may occur. Therefore, when using cleaning solution (recommended ph-value 5.5-8.5), it is advisable not to use those which have high contents of alkaline or acid.

The following sterilization method can be used without hesitation: Sterilizing with humid heat in the autoclave (e.g. at 134 °C / 273 °F). Please follow the operating instructions of the appliance according to the manufacturer and observe the recommendations regarding the duration of sterilization.

Aceste produse sunt fabricate din aluminiu anodizat colorat. Când se utilizează soluții de curățare chimică poate să apară o ușoară decolorare. De aceea cand se utilizeaza o solutie de curatare (cu valoarea recomandata a ph-ului de 5.5-8.5), este recomandat a nu se utiliza cele ce care au un continut ridicat alcalin sau acid.

Următoarea metodă de sterilizare poate fi utilizat fără ezitare: Sterilizarea cu abur în autoclavă (de exemplu la 134 °C). Vă rugăm să urmați instrucțiunile de utilizare ale produsului, conform producătorului și să respecte recomandările privind durata de sterilizare.

The following application tips apply for aluminum products:

- Observe the regulations precisely of the disinfectant manufacturer: some are not suitable for aluminum!

Următoarele sfaturi se aplică pentru produsele din aluminiu:

- Se vor respecta întocmai reglementările producătorului pentru dezinfectant: unele nu sunt potrivite pentru aluminiu!

## BS770



B 42 x H 70 x T 125 mm

For 17 RA instruments or 17 FG instruments or  
17 Handpiece instruments

Pentru 17 freze RA sau 17 freze FG sau 17 freze  
piese de mana