

CUTII DE ARHIVARE, STERILIZABILE CU GARNITURA DE CAUCIUC | BUR BLOCKS, STERILIZABLE WITH RUBBER GROMMETS

These products are manufactured from colored anodized aluminum. When using chemical cleaning solutions, a slight discoloring may occur. Therefore, when using cleaning solution (recommended ph-value 5.5-8.5), it is advisable not to use those which have high contents of alkaline or acid.

The following sterilization method can be used without hesitation: Sterilizing with humid heat in the autoclave (e.g. at 134 °C / 273 °F). Please follow the operating instructions of the appliance according to the manufacturer and observe the recommendations regarding the duration of sterilization.

Aceste produse sunt fabricate din aluminiu anodizat colorat. Când se utilizează soluții de curățare chimică poate să apară o ușoară decolorare. De aceea când se utilizează o soluție de curățare (cu valoarea recomandată a ph-ului de 5.5-8.5), este recomandat a nu se utiliza cele ce care au un conținut ridicat alcalin sau acid.

Următoarea metodă de sterilizare poate fi utilizat fără ezitare: Sterilizarea cu abur în autoclavă (de exemplu la 134 °C). Vă rugăm să urmați instrucțiunile de utilizare ale produsului, conform producătorului și să respecte recomandările privind durata de sterilizare.


The following application tips apply for aluminum products:

- Observe the regulations precisely of the disinfectant manufacturer: some are not suitable for aluminum!

Următoarele sfaturi se aplică pentru produsele din aluminiu:

- Se vor respecta întocmai reglementările producătorului pentru dezinfectant: unele nu sunt potrivite pentru aluminiu!

GRN11

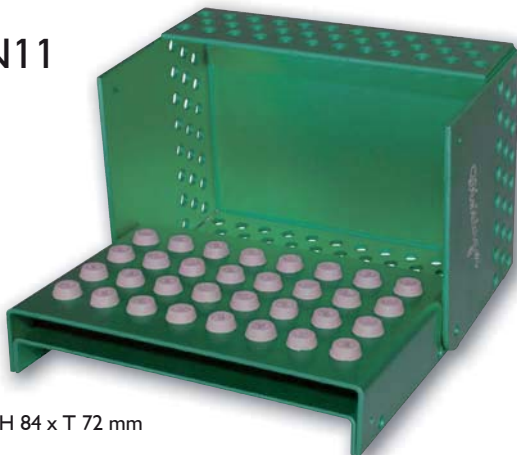

B 120 x H 84 x T 72 mm

For 32 Handpiece instruments
Pentru 32 freze piese de mana