

**CUTII DE ARHIVARE, STERILIZABILE CU GARNITURA DE CAUCIUC | BUR BLOCKS, STERILIZABLE WITH RUBBER GROMMETS**

These products are manufactured from colored anodized aluminum. When using chemical cleaning solutions, a slight discoloring may occur. Therefore, when using cleaning solution (recommended ph-value 5.5-8.5), it is advisable not to use those which have high contents of alkaline or acid.

The following sterilization method can be used without hesitation: Sterilizing with humid heat in the autoclave (e.g. at 134 °C / 273 °F). Please follow the operating instructions of the appliance according to the manufacturer and observe the recommendations regarding the duration of sterilization.

The following application tips apply for aluminum products:

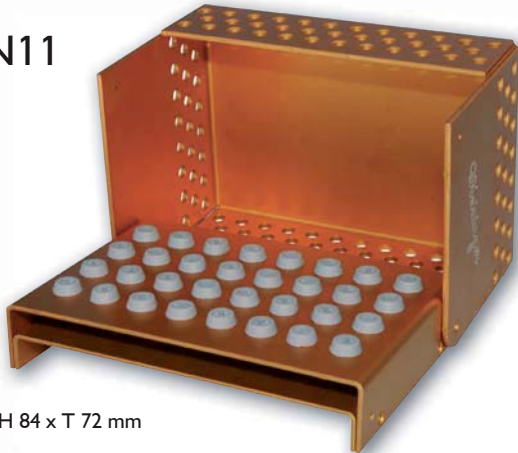
- Observe the regulations precisely of the disinfectant manufacturer: some are not suitable for aluminum!

Aceste produse sunt fabricate din aluminiu anodizat colorat. Când se utilizează soluții de curățare chimică poate să apară o ușoară decolorare. De aceea când se utilizează o soluție de curățare (cu valoarea recomandată a ph-ului de 5.5-8.5), este recomandat a nu se utiliza cele ce care au un conținut ridicat alcalin sau acid.

Următoarea metodă de sterilizare poate fi utilizat fără ezitare: Sterilizarea cu abur în autoclavă (de exemplu la 134 °C). Vă rugăm să urmați instrucțiunile de utilizare ale produsului, conform producătorului și să respecte recomandările privind durata de sterilizare.

Următoarele sfaturi se aplică pentru produsele din aluminiu:

- Se vor respecta întocmai reglementările producătorului pentru dezinfectant: unele nu sunt potrivite pentru aluminiu!

**ORN11**

B 120 x H 84 x T 72 mm

For 32 Handpiece instruments  
Pentru 32 freze piese de mana