

CUTII DE ARHIVARE, STERILIZABILE | BUR BLOCKS, STERILIZABLE |

These products are manufactured from colored anodized aluminum. When using chemical cleaning solutions, a slight discoloring may occur. Therefore, when using cleaning solution (recommended ph-value 5.5-8.5), it is advisable not to use those which have high contents of alkaline or acid.

The following sterilization method can be used without hesitation: Sterilizing with humid heat in the autoclave (e.g. at 134 °C / 273 °F). Please follow the operating instructions of the appliance according to the manufacturer and observe the recommendations regarding the duration of sterilization.

The following application tips apply for aluminum products:

- Observe the regulations precisely of the disinfectant manufacturer: some are not suitable for aluminum!

Aceste produse sunt fabricate din aluminiu anodizat colorat. Când se utilizează soluții de curățare chimică poate să apară o ușoară decolorare. De aceea cand se utilizeaza o solutie de curatare (cu valoarea recomandata a ph-ului de 5.5-8.5), este recomandat a nu se utiliza cele ce care au un continut ridicat alcalin sau acid.

Următoarea metodă de sterilizare poate fi utilizat fără ezitare: Sterilizarea cu abur în autoclavă (de exemplu la 134 °C). Vă rugăm să urmați instrucțiunile de utilizare ale produsului, conform producătorului și să respecte recomandările privind durata de sterilizare.

Următoarele sfaturi se aplică pentru produsele din aluminiu:

- Se vor respecta întocmai reglementările producătorului pentru dezinfectant: unele nu sunt potrivite pentru aluminiu!

OR102



B 54 x H 30 x T 25 mm

For 7 RA and 14 FG instruments
Pentru 7 freze RA si 14 freze FG